

医療用・器具除染洗浄器

# UV shower triple O

UVシャワートリプルOは、特定のUVオゾン管より照射する紫外線とオゾンの効果により医療器具等の表面を洗浄、殺菌する装置です。



紫外線 × オゾン = 汚染物質 酸化分解

紫外線による汚染物質の結合除去効果とオゾンによる強力な殺菌効果の相乗効果で、金属表面に付着した有機系薄膜(汚染物質)を酸化分解することが可能となり、金属表面に最高の洗浄効果を発揮します。

○ 基本原理

従来より、UV管の185nmの波長はオゾン線、254nmの波長は殺菌線と呼ばれ、基板洗浄、改質、純水の殺菌やアンダーカットの多い塗装前処理など幅広い用途で使用されています。

素材へのダメージが少なく、有機物の除去や表面の親水を促進させ、ドライプロセス洗浄として現在も多くの分野で利用されている除染原理です。

また、残留薬液の問題や廃液処理の心配もなく安心してご使用いただけます。



# UV shower triple O



● オゾン分解装置

## 効果と特徴

### 1 除染処理時間の短縮

- 照射距離や処理空間を考慮するために 35W の UV オゾン管 (2本) を角度をつけて上部に搭載することで、処理時間を大幅に短縮しました。
- 高い紫外線照度を持たせると同時に照射効率を考えた形状設計となっております。

### 2 熱放射を考慮した設計

- UV 管は照射時間が長くなると、熱放射による過剰な高熱を除染物に与えてしまうことがありますが、本機はオゾンガス密閉空間の外側をファンで空冷することにより除染物に過剰な熱が加わらないように設計されています。
- UV 管は除染物に出来る限り影のできないように効果的に配置しており、オゾンガスの特徴を考慮した植立位置の設定により確実な除染を行うことができます。

### 3 10 分の除染効率

- 照射時間を 10 分単位で繰り返すことで、除染効果の効率を図り、同時に照射熱を最小限に抑えることが可能です。(分、時間単位、フルスケール 60 分等、設定値変更も可能)

### 4 オゾンガスを安全に処理

- 処理後オゾンガス濃度の低下を待つ必要がなく、安全に除染物を取り出していただけるようオゾンガス処理装置をセットに組み込みました。
- 処理空間は密閉状態に近くなるように設計されていますが、漏れたオゾンガスは後方で活性炭により吸着されるような設計となっております。
- オゾン分解剤にはアルミナシリカゲルを主体に粉末活性炭を配合・成形したもので日本原子力研究所の協力のもとに危険性のない安全な分解剤として開発されたものです。

## 仕様

医療機器許可番号 27B3X00239000006

種別 医療用洗浄器  
 販売名 UV-shower・Triple-O  
 電源 AC100 50/60Hz 80W  
 ランプ特性 35W U字管ラビットスタート型 2灯  
 紫外線波長253.7nm オゾン量80mg/h(1灯)×2灯

タイマー 10分～60分切替え機能付き  
 オゾン分解剤 MR-4 300g  
 オゾン吸着剤 活性炭  
 寸法 幅180×高さ168×奥行き400 (mm)  
 質量 7.5kg

### 〔製造元〕

有限会社 アトミック

〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通 1-14-4

TEL・FAX 06-6927-7786

### 〔販売店〕

株式会社ブレンベース

〒140-0014

東京都品川区大井 1-49-15 アクセス大井町6階

TEL 03-3778-0745 FAX 03-3778-4910